



LANÇAMENTO



DiscMap

O DiscMap é um produto desenvolvido para avaliar a pressão no interior do disco intervertebral durante o procedimento de discografia. Utilizado para auxiliar o diagnóstico de dores crônicas (se discogênica, facetária ou mista) e doenças degenerativas da coluna vertebral. Revela com precisão a origem da dor.





01

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS

A

CÂNULA INSUFLADORA

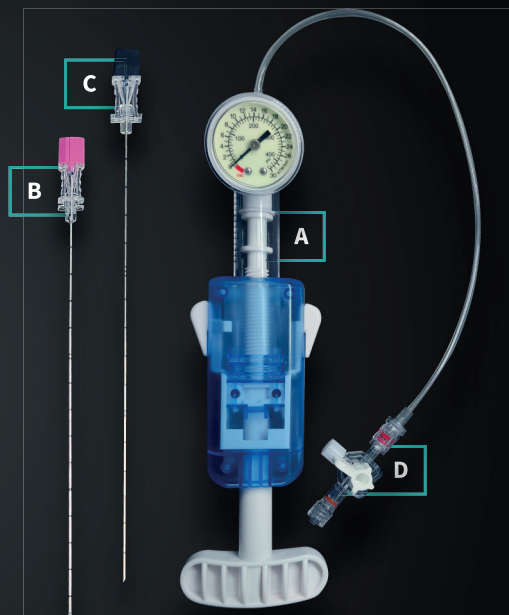
B

CÂNULA GUIA

C

CÂNULA INTRODUTORA

D

CONECTOR LUER -LOCK 3 VIAS**CONTÉM:**

Cânula Insufladora (1un)

Cânula Guia (1un)

Cânula Introduitora (1un)

Conector Luer-Lock 3 vias (1un)

02

LEITURA DO DISCO

Provém informações anatômicas e funcionais do disco imediatamente.

03

MEDIÇÃO

Mede diferenças de pressão reduzindo ainda mais risco de falso-positivos.

04

FUNCIONAMENTO

A discografia é o único método que pode associar as alterações morfológicas visualizadas nos exames de imagem com a dor lombar referida pelo paciente, identificando a origem da dor para tratamentos minimamente invasivos intradisciais. O método também pode ser usado para analgesia do disco vertebral identificado como doloroso, para fins de confirmação do diagnóstico, verificando se há resposta terapêutica ao bloqueio anestésico realizado no disco. As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, e dessa forma, cabe ao mesmo à escolha do método a ser empregado, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia. **Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas, protocolos cirúrgicos e critérios médicos adequados.**

05

INDICAÇÃO DE USO

O DiscMap está indicado nos procedimentos de discografia com a finalidade de mensurar a pressão interna do disco através do manômetro da cânula insufladora, simulando e permitindo a identificação da origem da dor. Utilizado para auxiliar o diagnóstico de dores crônicas (se discogênica, facetária ou mista) e doenças degenerativas da coluna vertebral. O dispositivo indicará a pressão inicial do disco intervertebral do paciente assim que puncionado, dando parâmetros ao médico para iniciar o procedimento. A pressão é atualizada automaticamente durante a injeção do contraste.

