


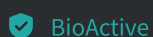


LANÇAMENTO



SmartDisc

O SmartDisc é um kit de instrumentais cirúrgicos desenvolvido para procedimentos de cisão e remoção de tecidos moles em diferentes regiões do corpo. Indicado para o tratamento de disco intervertebral, estenose espinhal, hérnia de disco e dores discogênicas, pode ser utilizado por via percutânea ou endoscópica, oferecendo precisão, segurança e eficiência em abordagens minimamente invasivas. O produto é fornecido estéril, de uso único e descartável, garantindo desempenho confiável e conformidade com as normas vigentes.



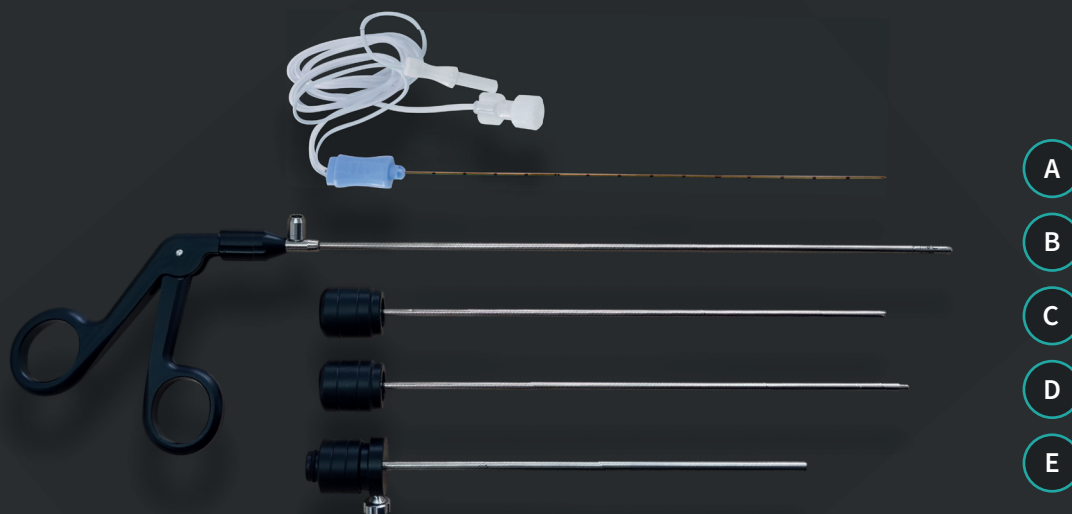

01

FUNCIONAMENTO / QUANTIDADE

- A** **Cânula 01 un.** - Utilizada para auxiliar a localização dos nervos a partir de uma corrente elétrica. Medicamentos podem ser administrados através dela.*
- B** **Pinça 01 un.** - Utilizada para realizar o tratamento, segurando e coletando tecidos e fragmentos.
- C** **Trefina 01 un.** - Função de corte, empregada no corte ou realização de orifício no ânulo fibroso.
- D** **Obturador 01 un.** - Utilizado para guiar a introdução do Trocater, após incisão inicial da pele, evitando lesões em áreas adjacentes.
- E** **Trocater 01 un.** - Utilizado como acesso e guia para os instrumentos.

02

INDICAÇÃO DE USO

O SmartDisc é utilizado em cirurgias de cisão e remoção de tecidos moles nas mais variadas partes do corpo, incluindo, mas não se limitando a procedimentos para tratamento de disco intervertebral, estenose espinhal, estenose foraminal, hérnia de disco e dor discogênica, dores lombares, torácicas ou cervicais.

04

COMPATIBILIDADE

Seu uso está associado a um equipamento devidamente registrado na ANVISA e que atenda os seguintes parâmetros: Corrente: 0,50mA - 0,80mA (+/- 5%) Frequência: 1Hz - 2Hz (+/- 1%) Duração do uso: 0,05ms - 1,0ms (+/- 10%) Impedância: 0 K'Ω - 12 K'Ω

03

APRESENTAÇÕES

Código	Descrição	★ Cânula
SMARTDISC50	SMARTDISC 21 G X 50 MM	Ø 21 Gauge X 50 mm
SMARTDISC100	SMARTDISC 21 G X 100 MM	Ø 21 Gauge X 100 mm
SMARTDISC150	SMARTDISC 21 G X 150 MM	Ø 21 Gauge X 150 mm

